


# bedal<sup>®</sup> flex

stabilisation et protection du cathéter

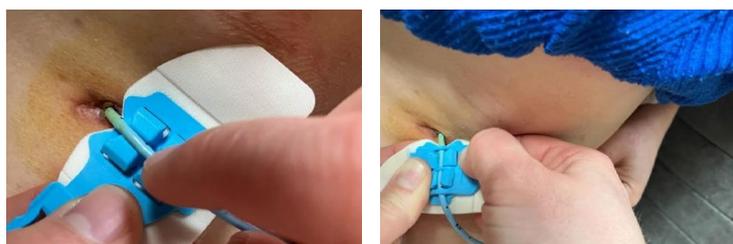

## PROCÉDURE DE REMPLACEMENT D'UN PANSEMENT BEDAL FLEX SUR UN CATHÉTER DE NÉPHROSTOMIE NON SUTURÉ

- Patient positionné sur le côté, enlevez la compresse
- Sortez le dispositif de son emballage et fixez-le.

- Inspectez le point d'entrée du cathéter et la peau environnante.
- Désinfectez la peau selon le protocole en vigueur et laissez sécher correctement

- Disposez le Bedal Flex aussi près que possible du point d'entrée du cathéter et positionnez le cathéter entre les 4 coussins d'air.
- Fermez le dispositif de fixation en appuyant fermement avec le pouce gauche sur la partie bleue.
- Avec votre main droite, fermez le clip

- Retirez avec précaution le protecteur de la partie adhésive en bas du Bedal Flex et fixez le dispositif sur la peau.
- Retirez avec précaution les protections latérales lorsque le dispositif de fixation est correctement mis en place,

- Assurez-vous que le pansement adhère bien à la peau.

- Recouvrez le Bedal Flex avec 2 compresses stériles si besoin.
- Recouvrez l'ensemble avec un pansement transparent.
- Résultat final : Remplacer le Bedal Flex tous les 7 jours.

vidéo d'instructions



bedal

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.flex-grip.com](http://www.flex-grip.com)