


bedal[®] flex

catheter cushion and **stabilization device**

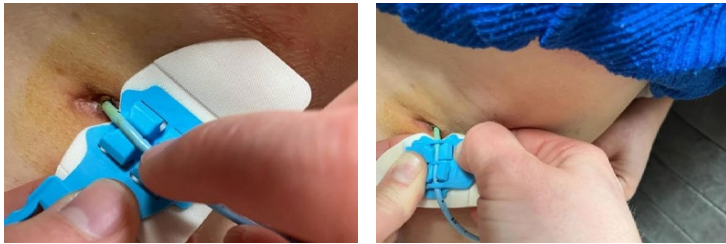

NON-SUTURED PCD에서 BEDAL FLEX를 교체하는 방법

- 옆으로 누운 자세에서, Gauze를 제거합니다.
- Catheter를 Bedal Flex에서 분리하고 임시로 피부에 고정합니다.

- Catheter 삽입부와 주변 피부에 감염이 있는지 확인 합니다.
- 피부를 소독하고 적절히 건조시킵니다. (충분히 건조된 상태에서 접착을 권장합니다.)

- 제품을 Catheter 삽입부에 최대한 가깝게 위치 후 Catheter를 Bedal Flex의 Air Cushion 중심에 끼워 넣습니다.
- 왼손 엄지로 고정 밴드를 잡고, Air Cushion 왼쪽에 밴드를 밀어서 끼웁니다.
- 왼손 엄지를 고정한채로 오른손으로 고정 밴드를 잡아 Air Cushion 오른쪽에 단추를 채우듯 걸어 주고, Catheter가 잘 고정되었는지 확인합니다.

- Bedal Flex 아래의 가장 바깥쪽 Sticker Cover를 제거하고 피부에 제품 중심부를 부착합니다.
- 알맞은 위치에 부착되면 나머지 양옆의 Sticker Cover를 제거해 제품을 완전히 고정해 줍니다.

- 제품이 피부에 제대로 부착되었는지 확인하십시오.

- Catheter 전체를 덮을 수 있도록 Bedal Flex에 멸균 Gauze를 올립니다.
- 투명한 필름 드레싱을 붙입니다.
- 최종 결과: 드레싱을 48시간마다 교체해 Catheter 삽입 지점을 자세히 살핍니다. Bedal Flex는 2주에 1번 교체 가능 합니다. (급여기준)

instruction video



bedal

Find out more on www.flex-grip.com