

bedal[®] flex

blazinica za kateter in **pripomoček za stabilizacijo**


POSTOPEK ZAMENJAVE PRIPOMOČKA BEDAL FLEX Z NEFROSTOMSKIM KATETROM Z BREZŠIVNIM SISTEMOM ZA PRITRJEVANJE



- Začetni položaj leže na boku, odstranitev povoja
- Odprite napravo za fiksiranje + izvlecite kateter, pritrdite kateter z lepilnim trakom



- Pregled vstopne točke katetra in okoliške kože
- Razkužite kožo z zdravilom Isobetadine Dermicum in pustite, da se dobro posuši

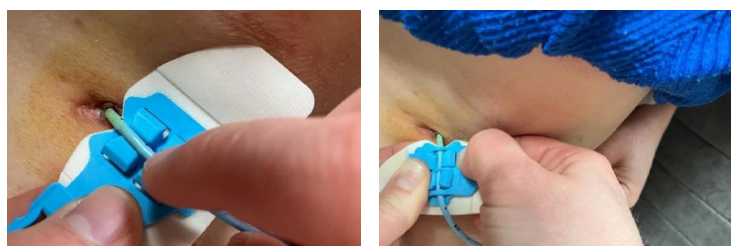

- Postavite pripomoček Bedal Flex čim bližje vstopni točki katetra in potisnite kateter med 4 zračne blazine
- Zaprite napravo za fiksiranje, tako da 4 zračne blazine pokrijejo kateter. Levi palec položite na modri del naprave in močno pritisnite
- Z desno roko zapnite sponko kot gumb na srajci



- Previdno odstranite odstranljivo zaščitno plast s spodnjega dela pripomočka Bedal Flex in ga pritrdite na kožo
- Ko je naprava za fiksiranje pravilno nameščena, odstranite stranske zaščitne plasti



- Prepričajte se, da je trak pravilno pritrjen na kožo



- Pripomoček Bedal Flex pokrijte z dvema sterilnima kompresama, da pokrijete celoten kateter
- Pokrijte s prosojno prevezo
- Končni rezultat: Vsakih 48 ur zamenjajte prekrivne povoje za pregled vstopne točke katetra, vsakih 7 dni zamenjajte Bedal Flex



posnetek z navodili



bedal

Več na www.flex-grip.com