

flexGRIP®


cojín para catéter y **dispositivo de estabilización**

PICC

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE UN FLEXGRIP PICC



- Con el paciente boca arriba en una posición cómoda.
- Inspeccione el punto de entrada del catéter y la piel circundante.
- Desinfecte la piel correctamente y deje que se seque.

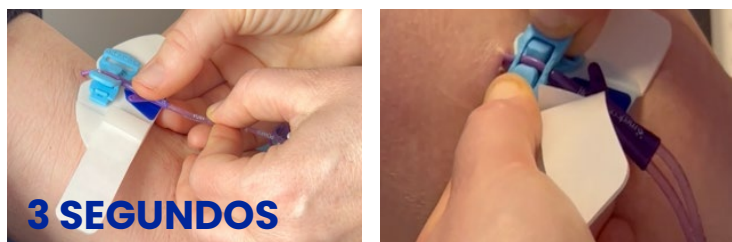


3 SEGUNDOS


- Retire el revestimiento de liberación del triángulo azul, coloque las alas de sutura sobre el triángulo y presione durante 3 segundos.
- Coloque el FlexGRIP lo más cerca posible del punto de entrada del catéter.



- Cierre el dispositivo de fijación de forma que las 2 almohadillas de aire presionen contra el catéter. Coloque el pulgar izquierdo en la parte azul del dispositivo, presione firmemente.
- Con ayuda de su mano derecha, cierre el clip como si fuese un botón de camisa y cierre la hebilla de seguridad adicional

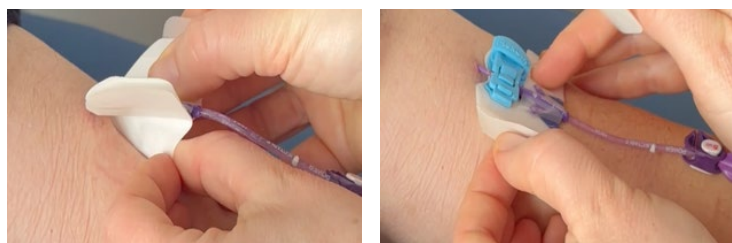

- Retire con cuidado el forro de liberación de la parte inferior del FlexGRIP PICC y fíjelo en la piel.
- Retire los forros de liberación lateral para fijar completamente el adhesivo a la piel.

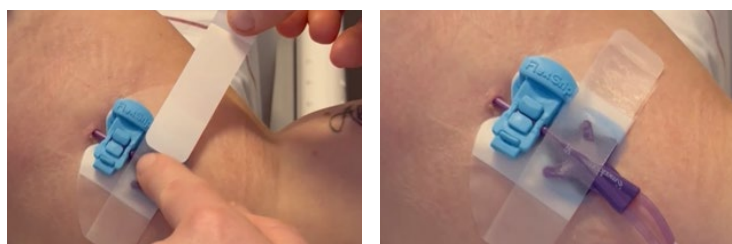

- Retire el forro de liberación de la tira de cobertura y ciérrela sobre las alas de sutura.



- Cubra con un apósito transparente.
- Escriba la fecha en el apósito transparente como recordatorio para sustituirlo al cabo de 7 días como máximo.
- Resultado final: FlexGRIP PICC colocado correctamente



vídeo de instrucciones



bedal

Descubra más detalles en www.flex-grip.com