

flexGRIP®


jastučić za kateter i uređaj za stabilizaciju

PICC


POSTUPAK ZA POSTAVLJENJE FLEXGRIP PICC-A




- Pacijent je u udobnom položaju na leđima.
- Pregledajte ulaznu točku katetera i kožu oko nje.
- Ispravno dezinficirajte kožu i pustite da se osuši.

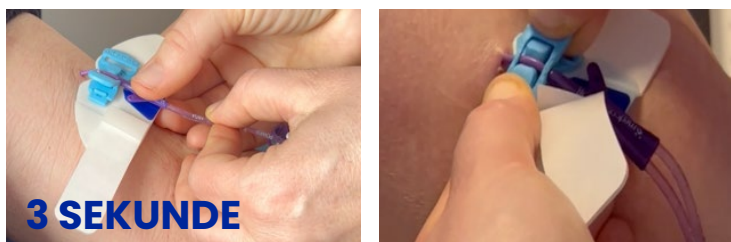


- Uklonite zaštitnu foliju plavog trokuta, stavite „leptiriće“ (eng. sutures wings) na trokut i pritisnite na tri sekunde.
- Stavite FlexGRIP što bliže ulaznoj točki katetera.

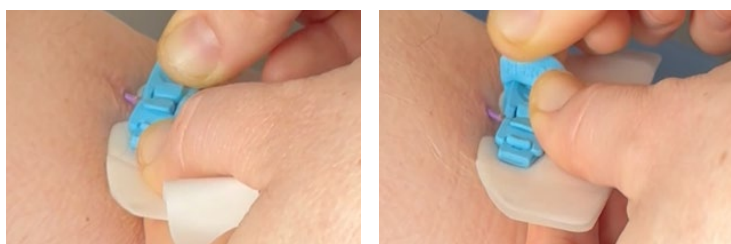

- Zatvorite fiksacijski uređaj tako da dva zračna jastuka pritisnu kateter. Stavite lijevi palac na plavi dio uređaja, čvrsto pritisnite.
- Desnom rukom zatvorite spojnicu poput gumba na košulji i zatvorite dodatnu sigurnosnu kopču.

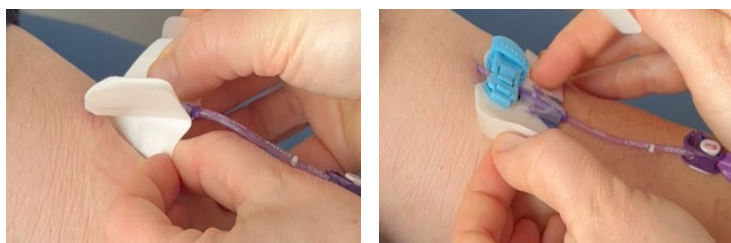

- Pozorno uklonite zaštitnu foliju s dna FlexGRIP PICC-a i fiksirajte na kožu.
- Uklonite bočne zaštitne folije i potpuno fiksirajte ljepljivi dio na kožu.

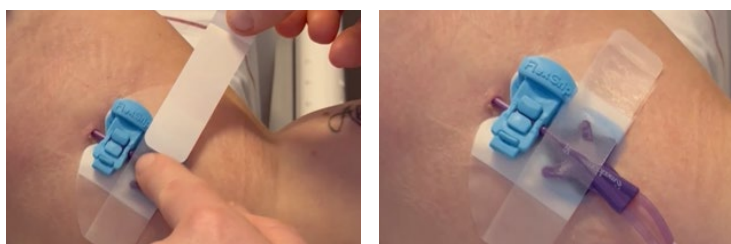

- Uklonite zaštitnu foliju prekrivajuće trake i zatvorite je preko „leptirića“ za pričvršćivanje.



- Prekrijte prozirnou podlogom.
- Na prozirnoj oblozi napišite datum kao podsjetnik za zamjenu nakon najviše sedam dana
- Krajnji rezultat: FlexGRIP PICC ispravno je postavljen



videozapis s uputama



bedal

Saznajte više na www.flex-grip.com