

flexGRIP[®]

catheter cushion and **stabilization device**

PICC


FLEXGRIP PICC 사용 절차




- 환자가 등을 댄 채 편하게 누울 수 있도록 합니다.
- Catheter 삽입부와 주변 피부에 감염이 있는지 확인 합니다.
- 피부를 소독하고 적절히 건조시킵니다. (충분히 건조된 상태에서 접착을 권장합니다.)




- 파란색 삼각형의 Sticker Cover를 제거하고, PICC의 Suture Wings를 삼각형 위에 두고 3초간 누릅니다.
- FlexGRIP PICC를 Catheter 삽입 지점에 최대한 가깝게 배치합니다.

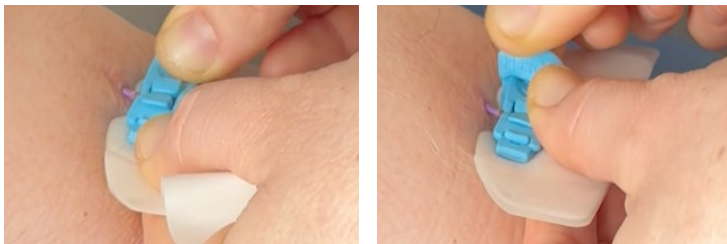

- 2개의 Air Cushion이 Catheter를 압박할 수 있도록 고정 장치를 단습니다. 왼쪽 엄지로 Band를 눌러서 왼쪽 Air Cushion에 고정 밴드를 끼웁니다.
- 오른손으로 단추를 채우듯 Band의 홈에 나머지 오른쪽 한개의 Air Cushion을 넣어서 고정시킨뒤, 스트랩으로 한번 더 고정합니다.

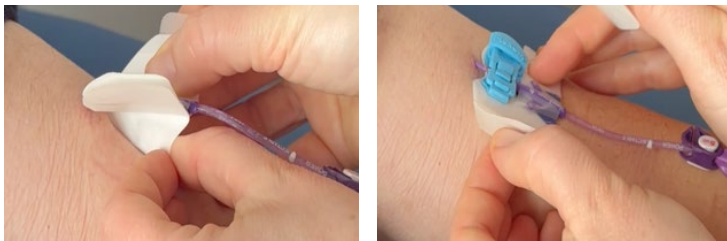

- FlexGRIP PICC 밑부분의 Sticker Cover를 제거하고 피부 위에 고정합니다.
- 양옆의 Sticker Cover를 제거해 FlexGRIP PICC를 피부에 단단히 부착합니다.

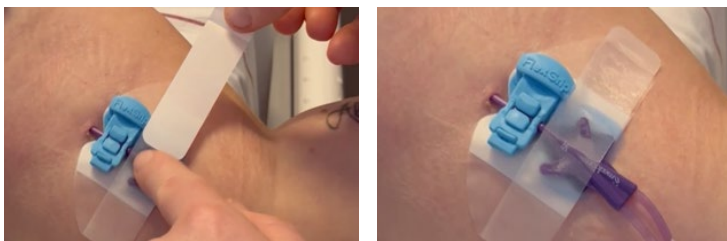

- 고정 밴드 아래의 추가 고정 밴드로 PICC의 Suture Wings를 한번 더 고정합니다.



- 투명 필름 드레싱을 제품 위로 붙입니다.
- 테가담으로 감싼 날짜를 적어, 최대 7일 뒤에 교체할 수 있도록 합니다.
- 최종 결과: FlexGRIP PICC의 올바른 사용



instruction video



bedal

Find out more on www.flex-grip.com