


# flexGRIP®


katheterkussen en **stabilisatiepleister**

## PICC


### PROCEDURE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN FLEXGRIP PICC

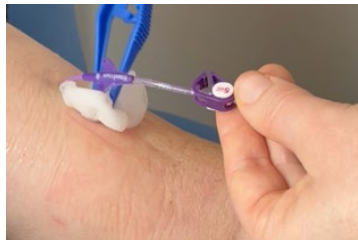


- Patiënt op de rug in comfortabele houding
- Inspecteer het ingangspunt van de katheter en de omliggende huid
- Ontsmet de huid goed en laat drogen

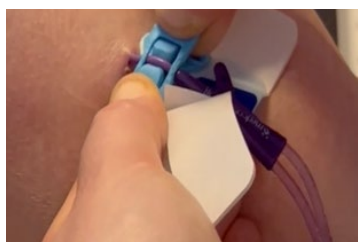


- Verwijder de folie van de blauwe driehoek, plaats de hechtvleugels op de driehoek en druk gedurende 3 seconden
- Plaats de FlexGRIP zo dicht mogelijk bij het ingangspunt van de katheter

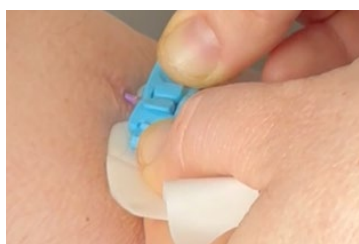

- Sluit de fixatiepleister zodat de 2 luchtkussens tegen de katheter drukken. Plaats uw linkerduim op het blauwe, kunststofgedeelte van de pleister en druk stevig aan
- Sluit met uw rechterhand de clip zoals een overhemdknoop en sluit de extra veiligheidsgesp

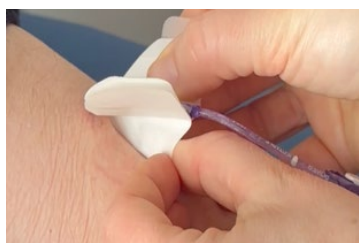

- Verwijder voorzichtig de folie aan de onderkant van de FlexGRIP PICC en fixeer op de huid
- Verwijder de folie om de pleister volledig op de huid te fixeren

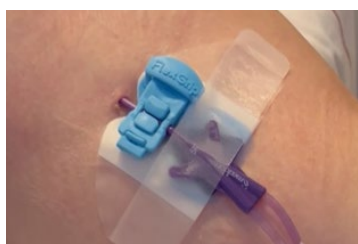

- Verwijder de folie van de afdekstrip en sluit deze over de hechtvleugels



- Dek af met transparant verband
- Schrijf de datum op het doorzichtige verband als herinnering om het na max. 7 dagen te vervangen
- Eindresultaat: FlexGRIP PICC goed geplaatst



instructievideo



bedal

Meer info op [www.flex-grip.com](http://www.flex-grip.com)