

# flexGRIP®


# PICC

blazinica za kateter in pripomoček za stabilizacijo

## POSTOPEK NAMESTITVE PICC FLEXGRIP




- Pacient leži na hrbtu v udobnem položaju
- Pregled vstopne točke katetra in okoliške kože
- Ustrezno razkužite kožo in pustite, da se posuši

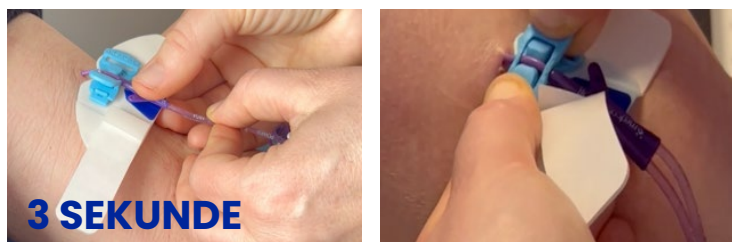


- Odstranite odstranljivo zaščitno plast modrega trikotnika, namestite šivna krila na trikotnik in pritisnite za 3 sekunde
- Pripomoček Bedal Flex postavite čim bližje vstopni točki katetra



- Zaprite napravo za fiksiranje, tako da 2 zračni blazini pritisnete na kateter. Levi palec položite na modri del naprave in močno pritisnite
- Z desno roko zapnite sponko kot gumb na srjaci in zapnite dodatno varnostno zaponko

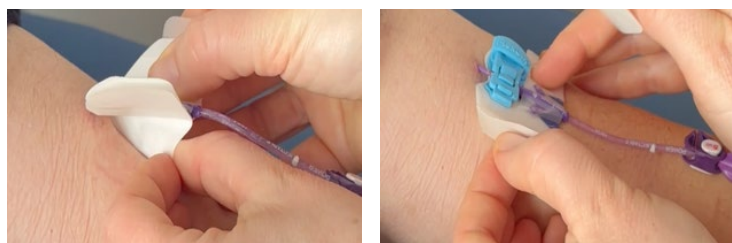

- Previdno odstranite odstranljivo zaščitno plast s spodnjega dela pripomočka PICC FlexGRIP in ga pritrdite na kožo
- Odstranite stranske zaščitne plasti, da se lepilo popolnoma pritrdi na kožo

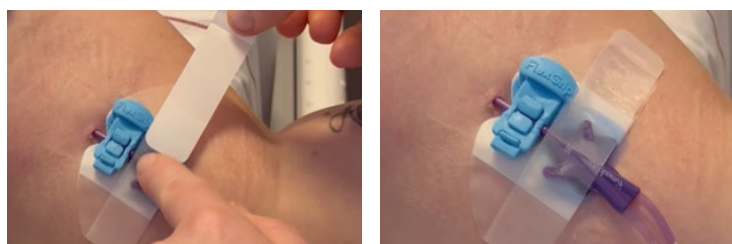

- Odstranite zaščitno plast prekrivnega traku in ga zaprite čez šivna krila



- Pokrijte s prosojno prevezo
- Na prosojno prevezo napišite datum kot opomnik za zamenjavo po največ 7 dneh
- Končni rezultat: Pravilno nameščen PICC FlexGRIP



posnetek z navodili



bedal

Več na [www.flex-grip.com](http://www.flex-grip.com)